



LBM du GCS Médico-Technique du Sud
Finistère

**BILAN DE MICRO ANGIOPATHIE
THROMBOTIQUE (MAT)**

Ref : MO-PRA-PREL-076-01

Version : 01

Applicable le : 12-04-2017



Analyses à faire avant traitement	Tube	Laboratoire	Code enregistrement
NFS, reticulocytes, schizocytes LDH, Haptoglobine, Bilirubine	1 violet et 1 vert gel	Bilan initial urgent	
ADAMTS 13 (activité, anticorps)	1 Bleu	Centrifuger 20 mn à 4000 rpm Congeler 3 x 500 µL	EXPE → Immunologie Pontchaillou
CH 50	3 Jaunes	Congeler le sérum	EXPE → Biomnis
C3, C4		Centrifuger Garder à 2-8°C	C3, C4
Ac anti DNA natif			AADNA
Ac anti Ag nucléaires solubles			AAECT
Ac anti cardiolipines			ACLIP
Ac anti bêta 2 GP1			B2GP
ACC		1 Bleu	Congeler les plasmas (aliquots de 700 µL)
Sérologie E.coli sécréteur de vérotoxines	1 Jaune + Selles (facultatif) + fiche renseignement	Congeler le sérum	EXPE → CNR des Escherichia coli Laboratoire des Bactéries Pathogènes Entériques Institut Pasteur 28 rue Dr Roux 75724 Paris
Coproculture avec recherche de germe sécréteur de vérotoxine (facultatif)		Garder les selles à 2-8°C	
Plasmathèque	3 Bleus	Congeler les plasmas	Garder Biothèque
Sérothèque	5 Jaunes	Congeler les sérums	